

# Schoonmaakinstructies

	DAGELIJKS	WEKELIJKS	MAANDELIJKS	IEDER KWARTAAL	IEDER HALF JAAR
<b>MASKER</b>					
Zachte delen masker	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak nat.</li> <li>2. Wrijf in met afwasmiddel.</li> <li>3. Spoel af met water.</li> <li>4. Laat drogen.</li> </ol>				
Harde delen masker		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak een sopje van afwasmiddel + water.</li> <li>2. Wrijf met zachte borstel schoon.</li> <li>3. Laat drogen.</li> </ol>			
Hoofdbandage			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak een sopje van zachte zeep/ fijnwasmiddel + water</li> <li>2. Was de hoofdbandage</li> <li>3. Laat drogen.</li> </ol> <p><u>GEEN</u> wasmachine.</p>		
<b>SLANG</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vul slang met water + afwasmiddel.</li> <li>2. Houd uiteinden dicht en schud.</li> <li>3. Spoel schoon.</li> <li>4. Laat drogen.</li> </ol>			
<b>BEVOCHTIGER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haal bevochtiger uit apparaat.</li> <li>2. Leeg en spoel om.</li> <li>3. Laat goed drogen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Vul bevochtiger met 1/5 schoonmaakazijn + 4/5 kraanwater.</li> <li>5. Laat 1 uur inweken.</li> <li>6. Leeg en borstel schoon.</li> <li>7. Spoel schoon.</li> </ol>			
<b>FILTERS</b>					
ResMed (wit)		Uitkloppen		Vervangen	
Weinmann (wit)			Vervangen		
Weinmann (zwart)		Met water uitspoelen			Vervangen
Fisher & Paykel (wit)		Uitkloppen		Vervangen	
Löwenstein (zwart)		Met water uitspoelen			Vervangen
Philips (zwart)		Met water uitspoelen			Vervangen
Philips Dreamstation (wit)		Met water uitspoelen			Vervangen